





TARDIGRAD
A service no one else can deliver


NÁVOD K POUŽITÍ

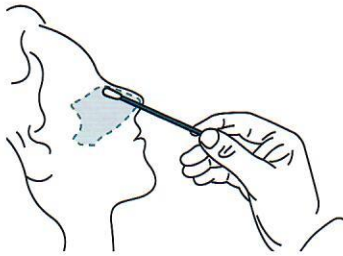


KROK 1
Odeberte vzorek pomocí
výtěrové tyčinky.

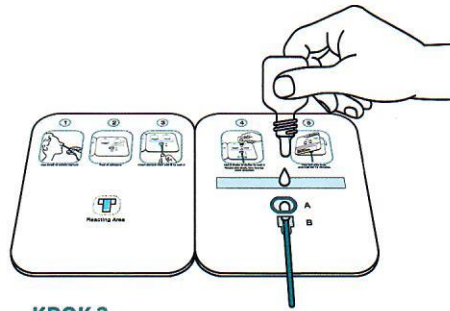

KROK 2
Prostrčte výtěrovou tyčinku
se vzorkem jamkou B do jamky A
a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

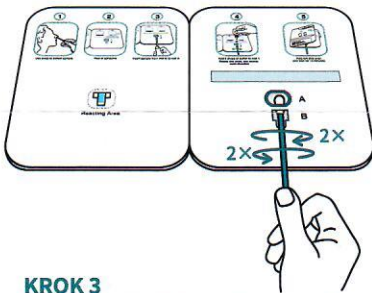

KROK 3
Tyčinkou dvakrát otočte ve směru
a proti směru hodinových ručiček.

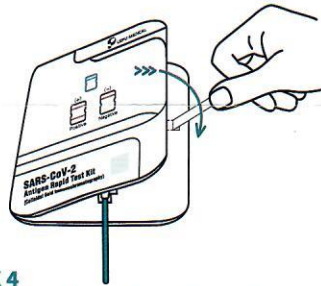

KROK 4
Odstraňte ochranný kryt fixačního
lepidla. Slepťe levou a pravou stranu
k sobě a vyčkejte 15 minut.

INTERPRETACE VÝSLEDKU


POZITIVNÍ
(+)



NEGATIVNÍ
(-)



NEPLATNÝ

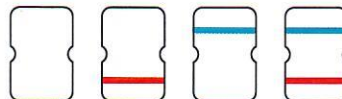

Tardigrad International Consulting, s.r.o.
Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6, Czech Republic
e-mail: prague@tardigrad.net
www.tardigrad.net

 Instuktážní
video na
youtube

